



Accutrend® Plus

Guía Rápida Manejo





Accutrend® Plus

De un vistazo

Codificación

[Sólo al abrir un nuevo tubo de tiras]:



Utilice la tecla **M** para encender el aparato.



Sujete el medidor en la mano y, con la tapa cerrada, introduzca la tira de codificación hasta el tope y retírela de inmediato. Aparece el número de código en pantalla y queda memorizado.

Para realizar 1 determinación:



Utilice la tecla M para encender el medidor.




Sujete el medidor en la mano e introduzca la tira sin muestra hasta el tope. Se oirá una señal y en pantalla aparece el código y nombre del parámetro elegido.



Efectúe la punción en la parte lateral superior de un dedo. Seleccione posición 3. Retire el protector inferior Pinchar presionando el botón superior.

Para realizar más de 1 determinación:

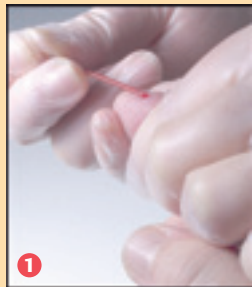

Efectúe la punción. Utilice capilares heparinizados, llene un tercio del capilar para cada determinación. En primer lugar realizar la glucosa.



Con el medidor en la mano, introduzca una tira sin muestra y cuando oiga la señal abra la tapa.




Aplique la sangre del capilar formando una gran gota que cubra la zona amarilla de la tira.





Abra la tapa y saque la tira acercándola al dedo.

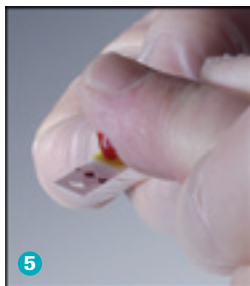

Aplique una gran gota de sangre que cubra totalmente la zona amarilla de la tira.



Introduzca la tira con la muestra en el medidor y...



Una vez aplicada la muestra en la tira cierre la tapa.

Empieza la medición. Resultados disponibles en:

- Glucosa: 12 segundos
- Colesterol: 180 segundos
- Triglicéridos: 174 segundos
- Lactato: 60 segundos

Una vez finalizada la medición, el resultado aparecerá en la pantalla. Las mediciones que están fuera del intervalo se indican con **Hi** (valor fuera del intervalo alto) o **Lo** (valor fuera del intervalo bajo).




Abra la tapa y retire la tira reactiva.



...cierre la tapa.



Tras unos segundos el resultado aparece en pantalla.

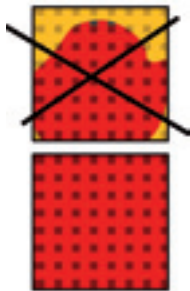

La zona test amarilla debe estar cubierta completamente de sangre.

Con una cantidad insuficiente de sangre se obtienen falsos negativos.

No toque la zona de aplicación con el dedo ni con el capilar.

No aplicar una segunda gota. La sangre debe aplicarse antes de 15 segundos tras la punción para evitar un resultado incorrecto.



COBAS, COBAS B y LIFE NEEDS ANSWERS
son marcas comerciales de Roche.

© 2017 Roche

Roche Diagnostics SL
Av. Generalitat, 171-173
08174 Sant Cugat del Vallès
España

cobas.com

05588391001 (17)

cobas[®]